


**1.**  
Controleer of de te breken ampul een markeringspunt heeft.



**2.**  
Wanneer op de ampul een markeringspunt is aangebracht, dan de ampul met het markeringspunt zichtbaar (bovenkant) in de ampulbreker invoeren. Ampul doordrukken tot weerstand wordt verkregen.




**3.**  
De onderkant van de ampulbreker (met de ampul) met vinger en duim vasthouden.

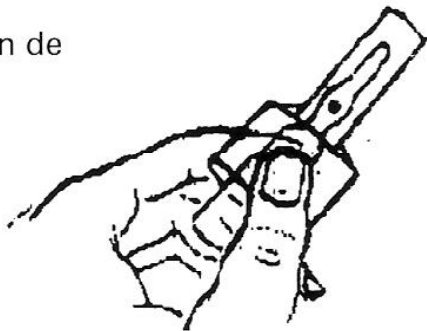

**4.**  
Breek de ampul door de beweegbare bovenkant van de ampulbreker van u af te bewegen met de andere hand.



**5.**  
De geopende ampul uit de onderkant van de ampulbreker halen.

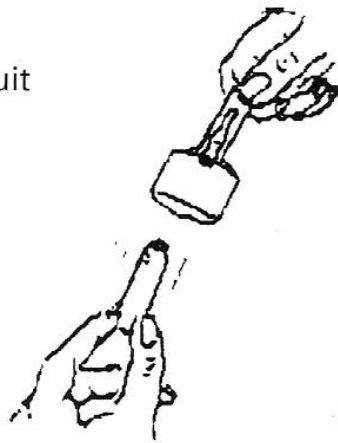

**6.**  
De ampulbreker met de afgebroken hals van de ampul weggooien.

