

Covid-19 antigeen

Sneltest

Sneltest die checkt op antigenen van het Coronavirus. Binnen 15 minuten een uitslag of iemand besmet is.



PRODUCTINFORMATIE

De Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Swab) is een in vitro immunochromatografische test voor de kwalitatieve detectie van nucleocapside-eiwitantigeen van SARS-CoV-2 via een neus "swab".

Het is bedoeld om te helpen bij een snelle diagnose van SARS-CoV-2-infecties. De Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Swab) maakt geen onderscheid tussen SARS-CoV en SARS-CoV-2.

Deze test is alleen voor professioneel gebruik.



Snelle uitslag

Deze sneltest geeft in 15 minuten een resultaat.



Hoge sensitiviteit/specificiteit

Relatieve sensitiviteit: 86,7%
Relatieve specificiteit: 100%
Nauwkeurigheid: 96.3%



Makkelijk inzetbaar

De sneltest is een eenvoudige test met weinig handelingen. Er is geen extra apparatuur nodig.

VOORDELEN

- Binnen 15 minuten resultaat.
- Snel kunnen beslissen over behandeling van patiënten.
- Simpele tijdsbesparende procedure.
- Complete testkit, geen extra benodigdheden nodig.
- Hoge sensitiviteit en specificiteit.

COVID-19

COVID-19 is een acute respiratoire infectieziekte. Mensen zijn over het algemeen vatbaar. Momenteel zijn de patiënten, besmet met het coronavirus, de belangrijkste bron van infectie. Gebaseerd op het huidige epidemiologisch onderzoek, is de incubatietijd 1 tot 14 dagen, meestal 3 tot 7 dagen. De belangrijkste symptomen zijn koorts, vermoeidheid en droge hoest. Ook komt verstopte neus, loopneus, keelpijn en spierpijn voor en in enkele gevallen wordt diarree vastgesteld. Antigeen is over het algemeen detecteerbaar in monsters van de bovenste luchtwegen tijdens de acute fase van infectie.



Table 1: The Coronavirus Ag Rapid Test vs PCR

Method	PCR		Total Results	
	Results	Positive		Negative
Coronavirus Ag Rapid Test Cassette	Positive	39	0	39
	Negative	6	116	122
Total Results		45	116	161

Relative Sensitivity: 86.7%

Relative Specificity: 100%

Accuracy: 96.3%

TESTKIT


De testkit van de COVID19 AG-test bestaat uit:

- 1x een gebruiksaanwijzing
- 1x werk station
- 2x buffervloeistof à 7ml
- 20x testcassettes
- 20x wattenstaafjes
- 20x testbuisjes


TESTPROCEDURE



Neem een monster met de wattenstaafje achter in de neusholte.

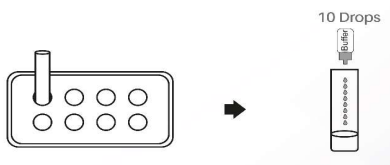


Plaats 10 druppels buffer in het buisje

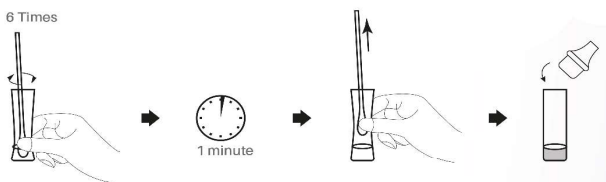

Plaats het monster in het buisje en draai deze 6 maal rond en laat het nog 1 minuut weken. Verwijder het wattenstaafje en plaats het dopje op het buisje.




Af lezen van resultaat.

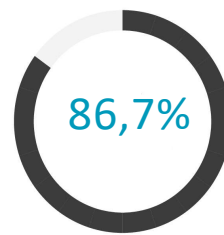

SENSITIVITEIT

De sensitiviteit ligt op 86,7%

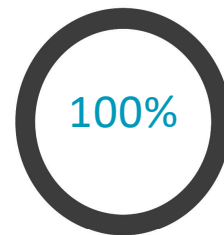

SPECIFICITEIT

De specificiteit ligt op 100%.



NAUWKEURIGHEID

Door de hoge sensitiviteit en specificiteit komt de nauwkeurigheid op 96,3%.

De Covid19 AG-test is te bestellen via de email of telefoon. Ook als u meer vragen heeft, neem gerust contact op.