



Incidin[®] PLUS

Desinfectans specifiek bestemd voor de desinfectie van medische hulpmiddelen (Medical Devices)

OP BASIS VAN DE GEPATENTEERDE
ACTIEVE WERKSTOF
GLUCOPROTAMINE.



Voordelen

- Bevat glucoprotamine
- Breed werkingsspectrum (incl. MRSA)
- Intensieve reinigende werking
- Lage toepassingsconcentratie
- Goede biologische afbreekbaarheid
- Voldoet aan de DGHM-normen
- Geschikt voor de doseerapparaten DG1 en DG3
- Compatibiliteit met verschillende materiaalsoorten, uitgebreid getest

TOEPASSINGSGBIED

Oppervlakkendesinfectans bestemd voor medische hulpmiddelen, geschikt voor alle afwasbare oppervlakken (Medical Devices)

GEBRUIKSAANWIJZING

Het product verdunnen in water van max. 30°C. Gebruik van hulpmiddelen voor een correcte dosering wordt aanbevolen. Niet naspoeien of nadrogen. Voor manueel gebruik.

VERPAKKINGEN / REFERENTIES

Doseerflacon 2 L – verp. : 3 x 2 L – ref. : 3022890

6 L bidon – verp. : 1x 6 L – ref. 3022900

Zakje 20 ml – verp. : 250 x 20 ml – ref. : 3022880

SAMENSTELLING

100 g bevat : 26 g glucoprotamine

AANBEVELINGEN

Incidin[®] Plus is de nieuwste vorm van desinfectie. Het product bevat geen quaternaire ammoniumverbindingen, noch aldehyden. Men bekomt een zeer goede compatibiliteit met materialen, geen klevend effect door vorming van residu en daarenboven een zeer grote zekerheid in de risicozones door het brede werkingsspectrum. Het product is niet vluchtig en dus aangenaam in gebruik.

Incidin[®] Plus is veilig voor :

- metalen, bv messing
- synthetische materialen
- elastomeren, bv. EPDM
- vloerbekledingen, bv. linoleum

WERKINGSSPECTRUM

Werkingspectrum	Conc %	Inwerktijd
Oppervlakkendesinfectie in ziekenhuizen en in medische praktijken (DGHM)	0,25 0,5 1,0	4 uur 1 uur 30 min
Medical Devices	2,0	15 min
<u>Werking tegen</u> : vaccinavirus (Elstree) adenovirus (Adenoïde 6) papovavirus SV 40 (777)	0,5 1,0 0,5	15 min 1 uur 1 uur
Werking tegen HIV	0,25	5 min
Werking tegen het herpesvirus	0,1	5 min
Werking tegen het HBV in de MADT : risicozone profylaxe	0,5 1,0	2 uur 90 min
Werking tegen het HBV in de antigenetest	0,5 1	1 uur 30 min
Werking tegen het rotavirus	0,5	15 min
Doeltreffendheid tegen tuberculose (Medical Devices)	0,5 1,0 2,0	4 uur 1 uur 30 min

INFORMATIE

Wetenschappelijk dossier, MSDS-fiche verkrijgbaar op aanvraag.



20 ml (zakje)



2 L (doseerfles)



6 L bidon

Uitsluitend voor professioneel gebruik

CE 0297

Ecolab Healthcare

Clean. Safe. Healthy.

Ecolab. BVBA/SPRL
Z.3. Doornveld 164, 1731 ZELLIK
Tel: 32 2/467.51.11 Noodnummer: 32 13/67.06.70
Customer Service België : emailadres : order.be@ecolab.com

Microtek Medical BV, A Division of Ecolab
Hekkehorst 24, 7207 BN ZUTPHEN (NL)
Tel : 31 575.599.200

Worldwide Headquarters
370 Wabasha Street N St. Paul, MN 55102
www.ecolab.com
© 2008 Ecolab Inc. All rights reserved

 **MICROTEK**[™]
MEDICAL – A DIVISION OF ECOLAB