



Incidin[®] Foam

Registratienummer. : 13537N

**SNELWERKEND, GEBRUIKSKLAAR
DESINFECTIESCHUIM VOOR
OPPERVLAKKEN**

- ▲ Geen inhalatie van aërosol
- ▲ Gebruiksklaar
- ▲ Korte inwerktijd



Incidin® Foam

Registratienummer. : 13537N

SNELWERKEND, GEBRUIKSKLAAR, DESINFECTIESCHUIM VOOR OPPERVLAKKEN

Eigenschappen	Voordelen
Gebruiksklaar	Makkelijk in gebruik, onmiddellijk toe te passen
Schuimformule	Duidelijk zichtbaar op de oppervlakken die worden behandeld. Geen inademing door aerosolvorming
Breed werkingsspectrum, zeer korte inwerktijd	Optimale veiligheid voor patiënt en personeel
Zeer materiaalvriendelijk	Toepasbaar op metalen, kunststof (ook plexiglas), gelakte oppervlakken enz...
Bevat oppervlakte actieve stoffen	Reinigende werking



TOEPASSING

Snelwerkend, gebruiksklaar desinfectieschuim voor allerlei kleine oppervlakken.

Gebruiksaanwijzing :

Het product Incidin® Foam puur op het oppervlak sproeien en goed laten inwerken. Vervolgens het oppervlak met een schone werkdoek nawissen. Of het product op een wegwerpdoek sproeien en het oppervlak daarmee afnemen. Vervolgens laten drogen.

Draag steeds handschoenen bij aanvang van het werk.

INFORMATIE

Wetenschappelijk dossier, veiligheidsfiche verkrijgbaar op aanvraag.

VERPAKKINGEN / REFERENTIES

750 ml flacon met spraykop –
verp. : 16 x 750 ml –
ref. 3046010

5 L bidon – verp. : 2 x 5 L –
ref. : 3013440

Incidin Foam kan gebruikt worden in combinatie met de INCIDIN WIPES.

Werkingspectrum	Inwerktijd
Oppervlakkendesinfectie (volgens DGHM) incl. TBC	5 min.
Sneldesinfectie (volgens DGHM)	1 min.
Omkapselde virussen, inclusief HBV, HIV, HCV	1 min.
<u>Werkzaam tegen</u> : - Vaccinia - Adeno - Papova / SV 40	1 min. 1 min. 30 sec.
<u>Werkzaam tegen</u> : Rotavirus	30 sec.

Samenstelling :

100 g bevat 20 g 2-Propanol, 10 g Ethanol, 0,2 g Benzalkoniumchloride, 0,01 g Glucoprotamine, oppervlakte actieve stoffen, parfum

