



Medicarine[®]

Desinfectietabletten voor oppervlakken

Medicarine[®] is een desinfectietablet op basis van actief chloor, bestemd voor de desinfectie van oppervlakken, zoals vloeren, wanden, meubilair, sanitair en gebruiksmaterialen.

Wettelijk toegelaten onder nummer : 9451N



Oppervlakken

Onze prestatie

- Medicarine[®] is wettelijk toegelaten als desinfectiemiddel onder nr. : 9451N
- Op basis van werkzame stof natriumdichloorisocyanuraat, één van de meest stabiele chloorverbindingen
- In tabletvorm, het product stuift niet, minder kans op irritatie van de ogen en luchtwegen
- Zeer breed werkingspectrum

Uw nut

- Is eenvoudig en correct te doseren, zonder verspilling
- De tabletten lossen snel en volledig op.
- Bij de juiste gebruikconcentratie worden de meeste kunststoffen en metalen oppervlakken niet aangetast.

Toepassing

Medicarine[®] chloortabletten zijn geschikt als desinfectiemiddel voor de behandeling van oppervlakken zoals vloeren, wanden, meubels, sanitair, gebruiksmaterialen e.d.

De te desinfecteren oppervlakken vooraf goed reinigen. Los minimaal 1 tablet Medicarine[®] op in 10 L water. Goed roeren. Minimale inwerktijd bedraagt 5 min.

Voor gebruik in het ziekenhuis en overige instellingen voor gezondheidszorg worden Medicarine[®] chloortabletten aanbevolen voor :

Toepassingsgebied

Voor gebruik in ziekenhuizen, medische praktijken en rust- en verzorgingstehuizen.

Samenstelling

Natriumdichloorisocyanuraat 86 %

Verpakking - referenties

Tabletten – verpakking : 6 x 300 tabletten
ref. : 302.176.0

Informatie

Wetenschappelijk dossier en veiligheidsfiche beschikbaar op aanvraag.

Toepassingsgebied	Conc.	Min. Inwerktijd
Oppervlakken (vloeren, wanden, meubilair) met uitzondering van TBC-afdelingen.	1 tablet op 10 L water	5 min.
Oppervlakken en apparatuur in keukens	1 tablet op 10 L water	5 min.
Toiletten en overig sanitair	1 tablet op 10 L water	5 min.
Instrumentarium, uitsluitend na gebruik en voor reiniging na sterilisatie, met uitzondering van cystoscopen en ander delicaat instrumentarium	1 tablet op 10 L water	5 min.



300 tabletten per flacon

1 tablet per 10 liter water geeft
150 ppm actief chloor.

Ecolab Healthcare Europe
A balanced approach to infection prevention