


ECOLAB[®]

Sekusept[®] forte



Voor de desinfectie van medische instrumenten, anesthesiematerialen en endoscopen (medical devices)



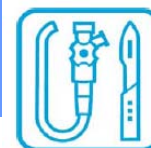

Voordelen

- Veilig in gebruik
- Breed werkingsspectrum
- Korte inwerktijd en lage toepassingsconcentraties



EIGENSCHAPPEN

- Werkzaam tegen bacteriën (incl. TBC), gisten en virussen inclusief Hepatitis B virus (HBV) en AIDS-veroorzakers (HIV). VAH gecertificeerd volgens DGHM methodes 2001
- Bevat corrosie-inhibitoren
- Is geschikt voor gebruik in ultrasoonbaden

TOEPASSINGSGEBIED

Voor reiniging en desinfectie van instrumenten uit metaal, glas, kunststof etc. In het bijzonder geschikt voor thermolabiele instrumenten die gedesinfecteerd maar niet gesteriliseerd moeten worden.

SAMENSTELLING

100 g bevat :

- 11,1 g formaldehyde,
- 3,75 g glutaaraldehyde
- 12 g glyoxaal
- 2,7 g benzalkoniumchloride

INFORMATIE

Wetenschappelijk dossier en MSDS-fiche zijn verkrijgbaar op aanvraag.

GEBRUIKSAANWIJZING

Desinfectieoplossing aanmaken door te verdunnen met water. Voorwerpen in Sekusept[®] forte oplossing leggen. Letten op volledige onderdompeling. Na voorgeschreven inwerktijd de voorwerpen uit de oplossing nemen en minstens met water van drinkwaterkwaliteit (beter met gedestilleerd of gedemineraliseerd water) afspoelen.

Een niet bevuilde oplossing kan max. 14 dagen gebruikt worden. Bij sterke bevuilding is het aanbevolen de oplossing regelmatig te verversen.

Instrumentendesinfectie volgens VAH :

Conc %	Inwerktijd
0,5 %	30 min.
1 %	15 min.
2 %	5 min.
3 %	1 u (TBC)

VERPAKKING / REFERENTIE

6 L flacon – verpakking : 1 x 6 L
Ref. : 3017640

Ecolab Healthcare

Clean. Safe. Healthy.

Ecolab. BVBA/SPRL
Z.3. Doornveld 164, 1731 ZELLIK
Tel: 32 2/467.51.11 Noodnummer: 32 13/67.06.70
Customer Service België : emailadres : order.be@ecolab.com

Microtek Medical BV, A Division of Ecolab
Hekkehorst 24, 7207 BN ZUTPHEN (NL)
Tel : 31 575.599.200

Worldwide Headquarters
370 Wabasha Street N St. Paul, MN 55102
www.ecolab.com
© 2008 Ecolab Inc. All rights reserved

